

pro • glider™

הכנת נתיב גלישה בפוצר אחד בלבד



לגלוש בתעלה
במהירות ובפשטות



+
WE
KNOW
ENDO.




רק פוצר רוטטורי אחד להכנת נתיב גלישה

צעד חיוני בהליך האנדודונטי הוא הכנתו של נתיב הגלישה, במטרה להבטיח את תעלת השורש לקראת השימוש במערכת פוצרים, אשר מטרתם עיצוב התעלה. באופן מסורתי, חלק זה של התהליך בוצע באמצעות פוצרים ידניים. עם זאת, PROGLIDER™ מציע מספר יתרונות בהשוואה לפוצרים אלו:

שימוש בפוצר אחד בלבד, חוסך בזמן יצירת נתיב הגלישה

דרוש רק PROGLIDER™ אחד על מנת להכין נתיב גלישה המכבד את המבנה האנטומי של תעלת השורש, דבר המאפשר לרופא השיניים לעבוד מהר יותר לעומת שימוש בפוצרים ידניים או בפתרונות רוטטוריים חלופיים ליצירת נתיב הגלישה.


הזמן הנדרש להכנת נתיב גלישה עם PROGLIDER™ הוא 40% פחות לעומת שימוש בפוצרי נתיב גלישה ידניים העשויים פלדת אל-חלד.

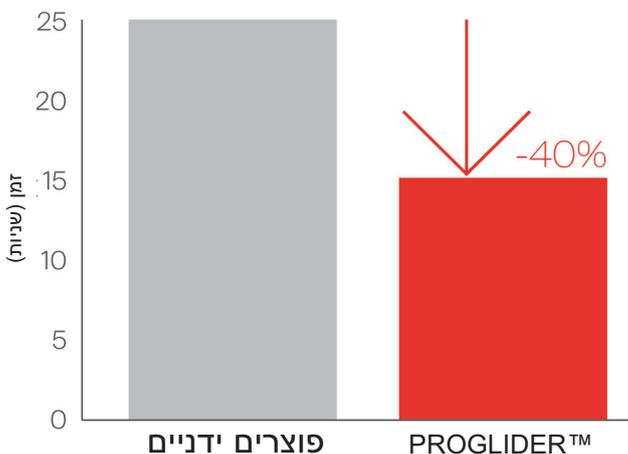

PROGLIDER™ היא מערכת גלישה רוטטורית ממוכנת מסוג NiTi, אשר מתאימה לכל רופאי השיניים המשתמשים בכל מערכת פוצרים שהיא, לעיצוב תעלות השורש, ואשר מחפשים אחר פתרון נתיב הגלישה המתקדם ביותר ברמת היעילות, הפשטות והבטיחות.

מכבד את האנטומיית תעלת השורש

PROGLIDER™ מכבד את המבנה האנטומי של תעלת השורש טוב יותר מפוצרים ידניים, שאיתם קשה להימנע מהסיכון לסטייה מציר התעלה (canal transportation), זיזים (ledges) וכד'.

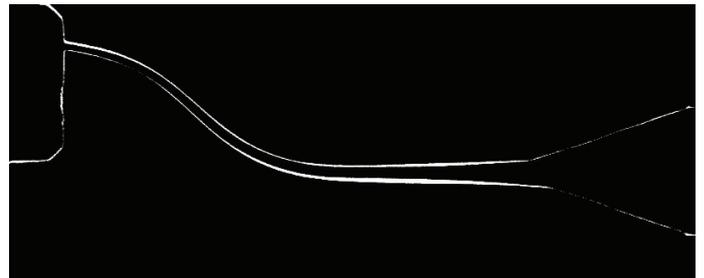

איור 1. הכנה עם פוצרי PROGLIDER™



איור 2. הכנה עם פוצרים מפלדת אל-חלד

מקרה שכיח של סטייה בתעלה (zip, ledges and transportation). קיימת ירידה משמעותית בסטייה בשימוש בקבוצת PROGLIDER™ (איור 1), בהשוואה לקבוצת פוצרים מפלדת אל-חלד (איור 2). Berutti et al. 2013.

PROGLIDER™ מתאים לרוב תעלות השורש. כולל תעלות בעלות כיפוף חד.



פתרון כולל לטיפולי שורש



pro • glider™ + PROTAPER • NEXT™

כשגלישה פשוטה פוגשת ביצועים גמישים

ה-PROGLIDER™ הוא פתרון המתאים לרוב תעלות השורש, כולל גם אלו בעלות הכיפופים החדים ביותר, בזמן שהוא מכבד את המבנה האנטומי של תעלת השורש. לכן זו היא בחירה מעולה בשילוב עם PROTAPER NEXT™.

כניסה לעידן של תקנים רפואיים מתקדמים

חברת DENTSPLY Maillefer תומכת בתקן הטיפול הרפואי, בכך שפוצרי PROGLIDER™ נעטפים באריזות מעוקרות מראש, לשימוש במטופל יחיד. דבר המאפשר מספר יתרונות רב:

יעילות חיתוך אופטימלית ✂️

מחקרים נוספים הראו, כי שימוש רב פעמי בפוצרים אנדודונטיים מקטין למעשה את יעילות החיתוך שלהם, ובכך פוגע באיכות הביצוע ובמידת שביעות הרצון, הן של רופא השיניים והן של המטופל.

יעילות וחסכון בזמן

אין צורך למחזר ולארגן מחדש פוצרי PROGLIDER™.

ירידת הסיכון לשבר הפוצר 🚫

פוצרים אנדודונטיים מראים סימני שחיקה במהלך שימוש רגיל. הם גם חשופים לפגיעות הנובעות מעייפות החומר, שהיא הגורם המוביל בשבר הפוצרים במהלך הטיפול. תופעה זו גדלה באופן דרמטי כשנעשה שימוש רב פעמי. שימוש חד פעמי מקטין לפיכך את הסיכון לשבר הפוצרים, ומגדיל את בטיחותו של המטופל.

אין סיכון לזיהום צולב 🦠

לא משנה עד כמה סטרילי האביזר, מחקרים מוכיחים כי חיידקים מסוימים ושאריות רקמה עלולים להישאר עליו ולהגדיל את הפוטנציאל לזיהום צולב אצל המטופל הבא.



שימוש במנוע סבב במהירות של 300 סל"ד ובטורק של 2 Ncm עד 5.2 Ncm בהתאם לנסיין הרופא.

קצה אפיקלי במידה 0.02. עם מגוון שיפועים משתנים.

מיוצר מסגסוגת M-WIRE® NiTi המספקת גמישות ורמת התנגדות גבוהה כנגד כוחות עיוות סיבוביים.



BLISTERS OF 6 FILES

A092622100103	PROGLIDER File Sterile 21mm	016 .02	21mm	blister of 6 files
A092622500103	PROGLIDER File Sterile 25mm	016 .02	25mm	blister of 6 files
A092623100103	PROGLIDER File Sterile 31mm	016 .02	31mm	blister of 6 files

BLISTERS OF 3 FILES

A092322100103	PROGLIDER File Sterile 21mm	016 .02	21mm	blister of 3 files
A092322500103	PROGLIDER File Sterile 25mm	016 .02	25mm	blister of 3 files
A092323100103	PROGLIDER File Sterile 31mm	016 .02	31mm	blister of 3 files



DENTSPLY
MAILLEFER

www.dentsplymea.com

DENTSPLY LIMITED
BUILDING 3, THE HEIGHTS
WEYBRIDGE
SURREY
KT13 0NY
UNITED KINGDOM

דנטלון

www.dentalon.com

מוצרי איכות לרפואת שיניים מתקדמת
רח' החופר 34,
א.ת. חולון
ת.ד. 71, תל אביב 61000
טלפון: 03-5505110

עודכן ב-2013.8. שינויים טכניים במוצרים שלנו אינם מדווחים. התמונות של המכשירים שלנו הינן להמחשה בלבד.

